

Test di gravidanza

Rilevazione Digitale Precoce

- Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.
- Può essere utilizzato 5 giorni prima del ritardo del ciclo.
- **Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima dell'esecuzione del test.**

1 Esegui il test

IMPORTANTE

Durante il test, non tenere **mai** lo stick di test con l'estremità assorbente rivolta verso l'alto.



Da fare



Da non fare

Se esegui il test dal giorno in cui sono previste le mestruazioni, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. Se esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, usa la prima urina del giorno.

- Quando sei pronta per eseguire il test, estrai lo stick di test dall'involucro di alluminio e rimuovi il cappuccio. Utilizza subito lo stick di test.

PUOI Esegui il test nel flusso di urina **OPPURE**

- Tieni nel flusso di urina l'estremità assorbente per **soli 5 secondi.**
- Fai attenzione a non bagnare il resto dello stick di test.
- Tieni l'estremità assorbente rivolta verso il basso, rimetti il cappuccio e lascia lo stick di test in posizione orizzontale.



Raccogliere un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito

- Colloca l'estremità assorbente nell'urina, come mostrato, per **soli 20 secondi.**
- Tieni l'estremità assorbente rivolta verso il basso, rimetti il cappuccio e lascia lo stick di test in posizione orizzontale.



2 Clearblue con conto alla rovescia intelligente

- A questo punto, sul display appare il conto alla rovescia intelligente, in modo che tu sappia che il test sta funzionando e ogni segmento apparirà in sequenza per mostrarti l'avanzamento del test.



Conto alla rovescia intelligente


- Se il conto alla rovescia intelligente non appare dopo che hai usato il test, vedi domanda 5.

3 Leggi il risultato

- Una volta completo, il conto alla rovescia intelligente scomparirà dal display e apparirà il risultato.
- Questo impiegherà al massimo 3 minuti, ma alcuni risultati potrebbero apparire in 1 solo minuto.
- Il risultato 'Incinta' rimarrà sul display fino a 6 mesi.
- Il risultato 'Non Incinta' rimarrà sul display per circa 24 ore.



Se il risultato è 'Incinta' vedi domanda 9.

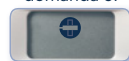

Se il risultato è 'Non Incinta' vedi domanda 10.

Domande e risposte

1 Qual è l'accuratezza di Clearblue?

Questo test ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio, quando viene usato dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.

2 Come funziona Clearblue?

Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Questo test può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml).

3 Quando posso eseguire il test con Clearblue Rilevazione Digitale Precoce?

L'ormone della gravidanza aumenta rapidamente nelle prime fasi della gravidanza e questo test può essere utilizzato fino a 5 giorni prima del ritardo del ciclo (cioè 4 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni). Se esegui il test prima del momento in cui sono previste le mestruazioni e ottieni un risultato "Non Incinta", c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati dei test clinici con campioni raccolti nelle prime fasi della gravidanza:

Test precoce				
Numero di giorni prima del giorno previsto delle mestruazioni	-1	-2	-3	-4
% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato "Incinta"	95%	90%	82%	51%

- Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.
- Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo degli ultimi mesi.
- Se esegui il test dal giorno previsto per il ciclo, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. Se esegui il test nelle prime ore del risveglio, usa la prima urina del giorno. Non bere grandi quantità di liquidi prima di eseguire il test.
- Se è il risultato "Non Incinta" ma sospetti comunque una gravidanza, vedi domanda 10.

4 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?

- Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
 - I farmaci per l'infertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per l'infertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato "Incinta").
 - Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene, antidiuretici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
 - Se hai smesso recentemente di prendere contraccettivi ormonali o hai in corso terapie per l'infertilità, ad esempio con citrato di clomifene, le tue mestruazioni potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
 - In caso di gravidanza recente (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato "Incinta".
 - La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre risultati ingannevoli.
 - Se ottieni il risultato "Incinta", è possibile che in seguito riscontri di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.
- Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

5 Ho utilizzato il test ma non è apparso il conto alla rovescia intelligente; che cosa significa?

Il test non è stato eseguito correttamente. Leggi "Errori nel test" qui sotto.

6 Il conto alla rovescia intelligente è progredito molto più rapidamente del previsto; che cosa significa?

Alcuni risultati potrebbero apparire in un solo minuto. In questi casi i segmenti del conto alla rovescia intelligente appariranno più rapidamente.

7 Il conto alla rovescia intelligente è partito ma non è terminato e non è apparso alcun risultato sul display, oppure adesso appare un errore. Che cosa significa?

Il test non ha funzionato correttamente, leggi "Errori nel test" qui sotto.

8 Ho utilizzato il test ma sul display non è apparso alcun risultato. Che cosa significa?

Il risultato deve apparire sul display entro 3 minuti. Se non è apparso alcun risultato, leggi "Errori nel test" qui sotto.

9 Il test dice "Incinta". Che cosa devo fare?

Se il risultato è "Incinta", dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare in seguito.

10 Il test dice "Non Incinta". Che cosa devo fare?

Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere abbastanza alto da poter essere rilevato o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni.

- Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno previsto per il ciclo.
- Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato "Non Incinta" e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

Errori nel test

Errore libro – si è verificato un errore durante il test. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- L'estremità assorbente non è stata rivolta verso il basso, oppure il test non è stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.
 - È stata utilizzata troppa o troppa poca urina.
- Esegui nuovamente il test con un nuovo stick. Fai attenzione a seguire le istruzioni.

Errore con display vuoto

Il test non ha funzionato come previsto. Questo può essere dovuto al fatto che non sono state seguite le istruzioni per l'uso. Devi eseguire un altro test. Segui con attenzione le istruzioni per l'uso.

Smaltimento del test

Rimuovi la batteria prima di smaltire lo stick di test. Lo smaltimento della batteria deve avvenire in conformità con le indicazioni di riciclo appropriate. Per rimuoverla, inserisci una moneta nella fessura sull'estremità e ruotala per aprire il retro dello stick di test. **Attenzione:** Non smontare né ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco. Smaltisci il resto dello stick di test secondo le indicazioni per il riciclo delle apparecchiature elettriche. Non gettare le apparecchiature elettriche nel fuoco.

www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi.

800 931 557

Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Questo monitor digitale IVD soddisfa i requisiti di emissioni e immunità dello standard EN 61326-2-6:2006. Le contromisure EMC adottate in questo strumento elettronico forniscono una ragionevole protezione contro gli effetti delle interferenze elettromagnetiche che probabilmente si possono riscontrare in ambiente domestico. Le seguenti avvertenze preventive si applicano alle apparecchiature conformi a EN 61326-2-6:2006. a) L'utilizzo di questo strumento in un ambiente secco, in particolare se sono presenti materiali sintetici (abiti sintetici, moquette, ecc.) può causare scariche elettrostatiche dannose con conseguenti errori nei risultati. b) Questo strumento non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di sorgenti di forti radiazioni elettromagnetiche (es. telefoni cellulari), in quanto possono impedire il corretto funzionamento.

	Produttore		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C

Per test eseguiti a casa in modo autonomo.

Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Non per uso interno.

Non riutilizzare.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare a 2 °C - 30 °C.


Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.

Non usare dopo la data di scadenza.

Il prodotto contiene le batterie.

Smaltire secondo la normativa locale in vigore.

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera. Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.

© 2017 SPD. Tutti i diritti riservati.

2300477.02 05-2017



0843

