

Alcuni farmaci o condizioni di salute possono influire sul risultato del test di gravidanza:

- Prima di eseguire il test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
- I farmaci per l'infertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per l'infertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato 'Incinta').
- Altre terapie per l'infertilità, antidolorifici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
- Se hai smesso recentemente di prendere contraccettivi ormonali o hai in corso terapie per l'infertilità, i tuoi cicli potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
- In caso di gravidanza recente (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato 'Incinta'.

- La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre risultati ingannevoli.
- Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile che in seguito riscontri di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.

Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

Il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue ti permette di eseguire il test di gravidanza rilevando la presenza dell'ormone della gravidanza, hCG, nelle tue urine. Ha dimostrato nei test di laboratorio un'accuratezza superiore al 99% nella rilevazione della gravidanza a partire dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.

Clearblue raccomanda di eseguire il test dal giorno in cui sono previste le mestruazioni. Tuttavia, l'ormone della gravidanza aumenta rapidamente nelle prime fasi della gravidanza e il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue può essere utilizzato per rilevare una gravidanza fino a 3 giorni prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni. Nei test clinici su campioni nelle prime fasi della gravidanza, il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue ha prodotto i seguenti risultati:

Numero di giorni prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni	% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato 'Incinta'
-1	96%
-2	91%
-3	74%

Clearblue

Monitor di fertilità

Avanzato
Test di gravidanza



Questi test devono essere utilizzati solo per eseguire test di gravidanza con il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue. Non possono essere utilizzati con nessun altro monitor Clearblue. Prima di utilizzare questi test, leggi le istruzioni fornite con il monitor. Quando utilizzi il monitor per la prima volta devi impostare un nuovo ciclo prima di eseguire il test di gravidanza.

Se hai perso le istruzioni del monitor, puoi richiederne una copia sostitutiva chiamando la linea assistenza consumatori Clearblue, oppure puoi scaricarne una copia dal sito www.clearblue.com.

Quanto è accurato il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue?

Il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue ha dimostrato nei test di laboratorio un'accuratezza superiore al 99% nella rilevazione della gravidanza a partire dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.



www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00 -16:00, festivi esclusi.

800 931 557


Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Italiano

Il risultato del tuo test di gravidanza



Il risultato è 'Incinta' e dovresti consultare il tuo medico per sapere che cosa devi fare in seguito.

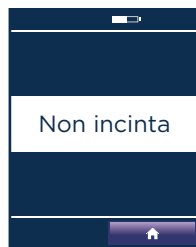

Il risultato è 'Non incinta'. Potresti non essere incinta oppure, se hai eseguito il test prima del giorno in cui era previsto il ciclo mestruale, può darsi che il livello di ormone della gravidanza non sia abbastanza alto da essere rilevabile. Esegui nuovamente il test nel giorno in cui sono previste le mestruazioni.

Se esegui il test nel giorno in cui sono previste le mestruazioni e il risultato è ancora 'Non incinta', puoi eseguire nuovamente il test nei 3 giorni successivi. Se questo test produce ancora un risultato 'Non incinta' e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

Errori di esecuzione del test

Se si verifica un errore durante l'esecuzione del test, la schermata visualizza un messaggio d'errore. Consulta il libretto di istruzioni del monitor per ulteriori informazioni.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera. Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD. ©2017 SPD. Tutti i diritti riservati.

Per test eseguiti a casa in modo autonomo. Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Non per uso interno.

Non riutilizzare gli stick di test.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura compresa fra 2 °C e 30 °C.

Portare a temperatura ambiente per 30 minuti se refrigerato.

Non utilizzare se la pellicola di alluminio contenente gli stick di test è danneggiata. Non usare lo stick di test dopo la data di scadenza.



0843

Produttore	Non riutilizzare
Codice lotto	Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
Data di scadenza	Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C

Esecuzione del test

Il monitor richiede solo test di fertilità. Valuta quando sono previste le mestruazioni, ma puoi eseguire un test di gravidanza in qualsiasi giorno, purché tu abbia impostato un nuovo ciclo. Puoi eseguire il test una sola volta durante l'orario del test, ma se ottieni un errore puoi ripeterlo utilizzando un nuovo test. Se devi raccogliere le urine per effettuare il test più tardi (ad esempio se devi andare in bagno prima che inizi l'orario del test), utilizza un contenitore asciutto e pulito e conservalo a temperatura ambiente fino a quando non effettui il test. Ricorda di effettuare il test nell'orario del test.


- 1 Quando sei pronta per eseguire il test, seleziona il test corretto. I test di gravidanza sono avvolti in una pellicola di alluminio bianca.



- 2 Apri la pellicola, estrai il test e utilizzalo immediatamente.



Non tenere il test con l'estremità assorbente rivolta verso l'alto, poiché questo potrebbe compromettere il risultato.

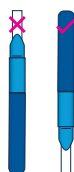

- 3 Scegli il metodo di test:

Nel flusso di urina

Esponi al flusso di urina l'estremità assorbente per soli **3 secondi**, tenendola rivolta verso il basso.



OPPURE

Per immersione


Raccogli un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito e immergi nell'urina unicamente l'estremità assorbente, come mostrato, per soli **15 secondi**.



- 4 Rimuovi il cappuccio.



- 5 Colloca il cappuccio sull'estremità assorbente. Asciuga tutta l'urina in eccesso.

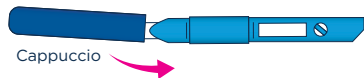


- 6 Inserisci immediatamente il test nel monitor. Se il monitor è spento, riaccendilo e attendi che **scompaia la schermata Clearblue prima di inserire il test.**

- 7 Cerca l'area di inserimento del test.




- 8 Tieni il monitor in posizione orizzontale, o appoggialo su una superficie piana.

- 9 Inserisci il test in modo che l'angolo tagliato si trovi sul bordo inferiore del test e il lato colorato del test si trovi sul lato destro dell'area di inserimento del test.

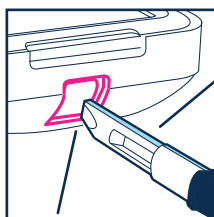


Controlla che il lato colorato del test si trovi sul lato destro dell'area di inserimento del test

Angolo tagliato rivolto verso il basso

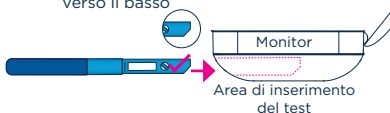

- 10 Spingi il test finché non senti un clic.

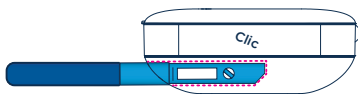

NON

Non inserire l'estremità assorbente nel monitor.




Non inserire con l'angolo tagliato rivolto verso l'alto.



Non inserire il cappuccio nel monitor.



- 11 Il monitor verifica che il test sia inserito correttamente e identifica se è un test di fertilità o di gravidanza. Una volta completato il processo, appare una schermata con il conto alla rovescia.

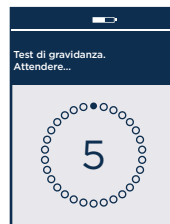

Non rimuovere il test durante il conto alla rovescia. Se rimuovi il test troppo presto apparirà un errore.

La schermata si spegne dopo 1 minuto, ma il monitor continua ad analizzare il test. La spia del test lampeggia.

- 12 Attendi 5 minuti il risultato.

- 13 Se riaccendi il monitor, la schermata mostra il tempo di attesa. Quando il test è completo, l'allarme suona e la luce smette di lampeggiare

- 14 Se il monitor è spento, riaccendilo e rimuovi il test.

- 15 Leggi il risultato. Il risultato può essere letto solo sul display e non può essere dedotto da qualsiasi linea che potrebbe apparire sul test.

- 16 Smaltisci il test nei normali rifiuti domestici. Non riutilizzare mai un test.