

# Clearblue®

**Test di gravidanza**  
Flip & Click

Leggi attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire un test.

Puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno, a partire dal giorno in cui sono previste le mestruazioni



**Non bere molti liquidi** prima di eseguire il test

Accuratezza superiore al 99% a partire dal giorno di inizio ciclo previsto

## 1 Apri completamente l'impugnatura e rimuovi il cappuccio

Rimuovi dalla pellicola di alluminio e usa subito dopo l'apertura.

**Solleva l'impugnatura e aprila completamente**



**Rimuovi il cappuccio**



## 2 Scegli il metodo di test

Posiziona la punta che cambia colore per **5 secondi**:

nel flusso di urina



oppure

in un campione di urina raccolto in un contenitore asciutto e pulito



**IMPORTANTE** immergi completamente la punta come mostrato

**IMPORTANTE:** la punta che cambia colore diventerà subito rosa a indicare che l'urina è assorbita, **ma DEVI continuare a tenerla nell'urina per 5 secondi esatti.** Rimetti il cappuccio e appoggia lo stick di test in piano. Se la punta non diventa completamente rosa, vedi 'Errori nel test'.

## 3 Attendi



Compariranno delle linee blu. In caso contrario, vedi 'Errori nel test'.

**Attendi 3 minuti ESATTI** prima di leggere il risultato.

## 4 Risultati

**Incinta - Se il risultato è 'Incinta' consulta il tuo medico.**



Finestra del risultato Finestra di controllo



**Non Incinta** (vedi domanda 3)



Affinché il risultato sia valido nella finestra di controllo dei risultati deve essere presente una linea blu. In caso contrario, vedi 'Errori nel test'.

**IMPORTANTE!** Leggi il risultato entro **10 minuti** dall'esecuzione del test. Dopo questo periodo di tempo, ignora ogni cambiamento.

## ? Domande e risposte

### 1 Come funziona Clearblue?

Il test rileva l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana) nell'urina. La sensibilità del test è pari a 25 mIU/ml. Ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio a partire dal giorno di inizio ciclo previsto.

### 2 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?

Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni dei produttori di qualsiasi farmaco che stai assumendo. Se ottieni risultati imprevisti, dovrai parlarne con il tuo medico. I farmaci contenenti hCG (ad es., Pregnyl<sup>®</sup> e Profasi<sup>®2</sup>) possono influire sul risultato. Una gravidanza ectopica o una gravidanza recente, anche se non portata a termine, può causare risultati ingannevoli.

Il test **NON** dovrebbe essere influenzato da terapie ormonali contenenti citrato di clomifene (ad es., Clomid<sup>®3</sup>), antidiuretici comuni, alcol, antibiotici o pillola anticoncezionale.

### 3 Il test dice 'Non Incinta'. Che cosa devo fare?

Se il risultato è negativo ma pensi di essere comunque incinta, esegui nuovamente il test dopo 3 giorni. Se il risultato è di nuovo negativo, ma sospetti ancora di essere incinta, consulta il tuo medico.

## ! Errori nel test

**La punta che cambia colore non è diventata completamente rosa.** Forse non hai fatto scorrere abbastanza urina. Tuttavia, puoi essere certa che il test abbia funzionato se la linea di controllo compare entro 10 minuti dall'esecuzione del test.

**Nessuna linea blu compare nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test.** Il test non ha funzionato, forse perché è stata utilizzata troppa o troppa poca urina. Ripeti il test usando un nuovo stick, seguendo attentamente le istruzioni.



Finestra del risultato Finestra di controllo



[www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Gli operatori sono disponibili Lun-Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi.

**800 931 557**

Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della qualità. È necessario avere a disposizione la confezione, incluso l'involucro interno del prodotto, quando ci contattate. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Per test eseguiti a casa in modo autonomo. Solo per uso diagnostico *in vitro*. Non per uso interno. Non riutilizzare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a una temperatura compresa fra 2 °C e 30 °C. Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato. Non usare il dispositivo dopo la data di scadenza. Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.

LOT	Codice lotto	IVD	Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>	Produttore
	Data di scadenza		Limite di temperatura 2 °C-30 °C	Non riutilizzare

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera. Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD. © 2019 SPD. Tutti i diritti riservati.

<sup>®</sup>Pregnyl<sup>®</sup> è un marchio registrato di ORGANON USA, Inc.

<sup>®</sup>Profasi<sup>®2</sup> è un marchio registrato di Ares Trading S.A.

<sup>®</sup>Clomid<sup>®3</sup> è un marchio registrato di Sanofi-Aventis.

